


Test Amslera

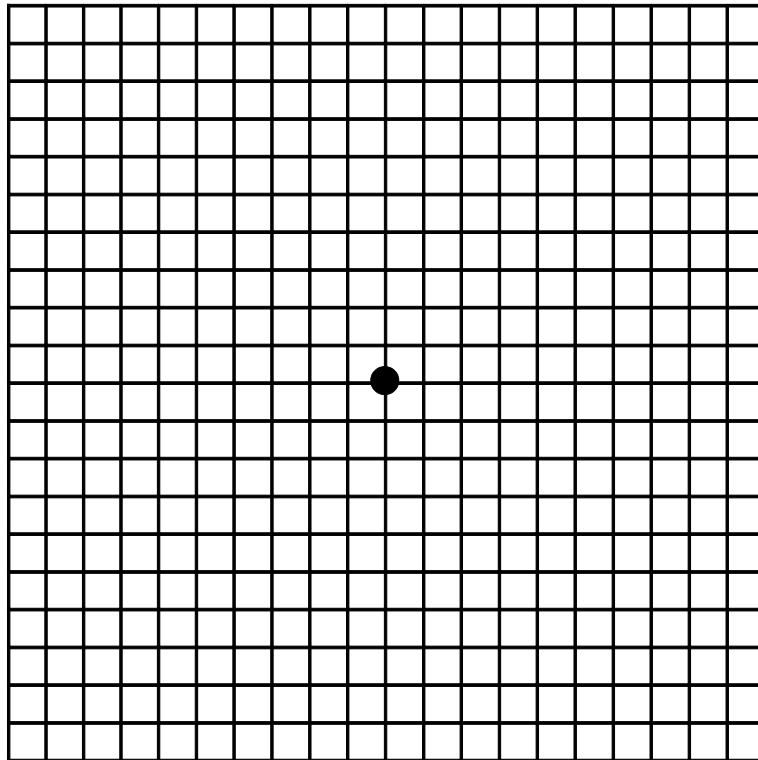

Instrukcja użytkowania:

1. Test należy wykonywać w odległości 30cm od twarzy.
2. Przed wykonaniem testu zadбай o odpowiednie oświetlenie.
3. Jeśli używasz do czytania okularów – załóż je.
4. Zasłoń jedno oko. Skoncentruj się na czarnym kółku znajdującym się w środku siatki.
5. Nie ruszając okiem oceń, czy wszystkie linie poziome i pionowe są proste, w takiej samej odległości od siebie i tej samej grubości.
6. Wykonaj test dla każdego oka oddzielnie oraz obuocześnie.
7. Jeżeli linie są krzywe, nierówne, pojawiają się plamy na obserwowanej siatce, zgłoś się do okulisty.